

Használati útmutató CVDS3D készülékhez

A CVDS3D segítségével mérhető a koronavírus jelenléte a levegőben, egy, a megadott alkatrészekből álló eszközzel.

Az összeszerelt CVDS3D készülékhez csatlakoztatott pumpa segítségével addig áramoltatjuk a reagens-oldaton a szűrt levegőt a pumpa segítségével, amíg ciklámen színről világos sárgára változik a reagens-oldat színe. Amint a színváltozás megtörtént, töltsse át a készülék tartalmát egy mintavételi edénybe, majd a mintát küldje el szaklaboratóriumi vizsgálatra.

Használati útmutató:

1. Nyomtassa ki a 3D fájlokat
2. Állítsa össze a kinyomtatott alkatrészeket
3. Csatlakoztassa a megadott eszközöket és töltsse fel a készüléket 100 mL reagenssel
4. Kapcsolja be a pumpát
5. A folyadék 2-3 óra után elszíntelenedik, ekkor kapcsolja ki a pumpát
6. Töltsse át a készülék tartalmát egy mintavételi edénybe, majd a mintát küldje el szaklaboratóriumi vizsgálatra.