

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

INCARVEXX Essential Orrspray jóddal

(35 ml)

Steril tengervíz oldat jóddal (I2), ami hozzájárul az orrüregek tisztántartásához, az ornyálkahártya hidratálásához és fertőtlenítéséhez. Az Égei-tenger vizének (az Athos-hegyi régió) felhasználásával készült orrspray eltávolítja a felhalmozódott nyálkahártyát, hidratál és megkönnyíti a légvételt.

Az **INCARVEXX ESSENTIAL ORRSPRAY** megakadályozza a vírusfertőzések terjedését, ideértve az új típusú koronavírus, a Covid-19-et is.

Összetevők:

Jódkomplex (200 mikrogramm elemi jód / ml), tolerálható felső beviteli határ (UL) 1100 mikrogramm / nap és tengervíz, gazdag tengeri ásványokban és nyomelemekben (nátrium, kalcium, kálium, magnézium stb).

Használat:

1. Csatlakoztassa a fúvókát a permetező palackoz egy erőteljes mozdulattal, mely során egy „klikk” hangot fog hallani. Minden használat után törölje le a fúvókát!
2. Betegség esetén: maximum napi 4-szeri használat, 2-4 fújást (puffert) alkalmazzon orrlyukanként.
3. Megelőzésre: használja naponta egyszer, 2 fújással, 1-1 puffer orrlyukanként.

Gyermekek, felnőttek és várandós nők számára is alkalmazható.

Tárolás: száraz, hűvös, napfénytől védett helyen.

Elővigyázatosság:

Használja fel a spray-t a csomagoláson feltüntetett lejáratási idő előtt!

Gyermekek elől elzárva tartandó!

Forgalmazó:

IOI Investment Zrt.
1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.
info@ioi-investment.com
www.drkontos.hu

Gyártó:

Pharmacosmetic – diafarm
Thermi, Thessaloniki, Greece

MDCE 0297